

**PROTOCOLE D'ENTRETIEN ET DE RELEVÉ HEBDOMADAIRE
DES TEMPERATURES DES REFRIGERATEURS POUR LES UNITES DE SOINS**

Marque du frigo	Modèle	No identification HUG	Unité	Année du relevé

RELEVÉ DES TEMPERATURES (Limites +2 à +8 °C)

Janvier - Juin

Sem.	Date	Temp. °C	Visa	Remarques
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

Juillet - Décembre

Sem.	Date	Temp. °C	Visa	Remarques
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				

DECONGELATION

Date	Visa

NETTOYAGE

Date	Visa

PROCEDURE D'ENTRETIEN

- | | |
|---|--|
| <p>→ Hebdomadaire
Contrôler la température et compléter le relevé</p> <p>→ Valeurs hors normes ou Pannes
Prévenir IRU de l'unité et voir avec service technique (frigoristes 26884)</p> <p>→ Selon les besoins (min. 2x / an)
- Décongélation du compartiment congélateur (si présent)</p> | <p>- Nettoyage du frigo</p> <p>→ Assurer la chaîne du froid des médicaments stockés (stockage provisoire dans autre frigo si possible)</p> <p>→ Laver le compartiment réfrigérant avec de l'eau tiède (ev. additionnée d'une faible dose de détergent – type produit de vaisselle)</p> <p>→ Rincer à l'eau claire et bien sécher</p> <p>Ne pas utiliser d'eau trop savonneuse, ni de produit de nettoyage abrasif, alcalin ou acide</p> |
|---|--|

**** Ce document doit être archivé 2 années civiles complètes en plus de l'année en cours dans l'unité ****