

## 4. OUVERTURE D'URGENCE DES PORTES

- PROCUREZ-VOUS LES CLES D'OUVERTURE:
  - dans votre unité de soins (IRU) (USI: dans le tiroir fermé sous la paillasse dans la pharmacie)
  - à la pharmacie (support logistique 31079 ou 31072 ou pharmacien de garde (079.743.01.05))

- Mettez les clés sur les serrures comme suit:

- Armoire « GAUCHE » sur la serrure de gauche  
« DROITE » sur la serrure de droite



- Poussez le loquet noir **vers le haut** afin de libérer les portes.
- Les portes se libèrent, vous avez accès aux produits.
- Pour refermer les portes, le loquet doit être de nouveau positionné vers le bas. Refermez simplement les portes une à une.

## 5. SITUATION DE REANIMATION (USI)

Si besoin rapide de médicaments:

### Utiliser les médicaments des chariots de réanimation des Chambres 2 et 6

- Le réapprovisionnement des chariots de réanimation se fait par l'armoire.
- Sélectionnez le patient « Réapro, Chariot d'urgence », puis retirer les médicaments de l'armoire (procédure habituelle)

Nom	ID de visite	Emplac.
Réapro, Bronchoscope	ED500009	USI PED
<b>Réapro, Chariot d'urgence</b>	ED500002	USI PED
Réapro, Etageres	ED500007	USI PED
Réapro, Trachéo	ED500008	USI PED

## CONTACTS UTILES

ASSISTANCE TELEPHONIQUE ARX  
demander une ligne extérieure  
auprès de la centrale HUG

Du lundi au samedi de 08h30 à 20h00  
Hotline ARX (France): 0033 825 079 619

En dehors de ces horaires,  
Hotline Carefusion (Canada): 0800.562.919

### PHARMACIE

**Jours ouvrables:**  
8h-12h et 13h-17h

**Assistants en pharmacie**

- Support logistique 079.55.31079
- Aspect techniques 079.55.31072

En dehors des jours ouvrables  
(pharmacien de garde) 079.743.01.05

## Guide de l'utilisateur PYXIS (armoire à pharmacie)



## PROCEDURE D'URGENCE

### 3. OUVERTURE D'URGENCE DU FRIGO

- PROCUREZ-VOUS LA CLE D'OUVERTURE:
  - dans votre unité de soins (IRU) (USI: dans le tiroir fermé sous la paillasse dans la pharmacie)
  - à la pharmacie (support logistique 31079 ou 31072 ou pharmacien de garde (079.743.01.05)
  - atelier frigoristes 26884 (heures ouvrables) ou centre de contrôle 133 (en dehors des heures)

Utilisez la clé « FRIGO »



Bouton d'ouverture des cubies du HAUT  
(de ce tiroir)

Lorsque ces boutons sont appuyés, les cubies s'ouvrent tous les uns après les autres (env. 10 sec entre chaque)

Bouton d'ouverture des cubies du BAS  
(de ce tiroir)

Si malgré cela, les cubies ne s'ouvrent toujours pas (ex: aucune alimentation électrique...) et si l'administration ne peut pas attendre la venue des assistantes en pharmacie ou du pharmacien de garde, alors le cubie doit être ouvert manuellement en faisant levier sur le mécanisme.



ATTENTION


**N'OUVRIR QUE LE CUBIE CONCERNÉ**  
(cf liste de tous les produits et leurs emplacements respectifs)  
**CAR CETTE ACTION DETRUIT LE MECANISME DE FACON IRREVERSIBLE**

### 1. OUVERTURE D'URGENCE DES TIROIRS

- PROCUREZ-VOUS LES CLES D'OUVERTURE:
  - dans votre unité de soins (IRU) (USI: dans le tiroir fermé sous la paillasse dans la pharmacie)
  - à la pharmacie (support logistique 31079 ou 31072 ou pharmacien de garde (079.743.01.05)
- Mettez les clés sur les serrures comme suit:
- Medstation « GAUCHE » sur la serrure de gauche  
« DROITE » sur la serrure de droite



Face arrière de la Medstation

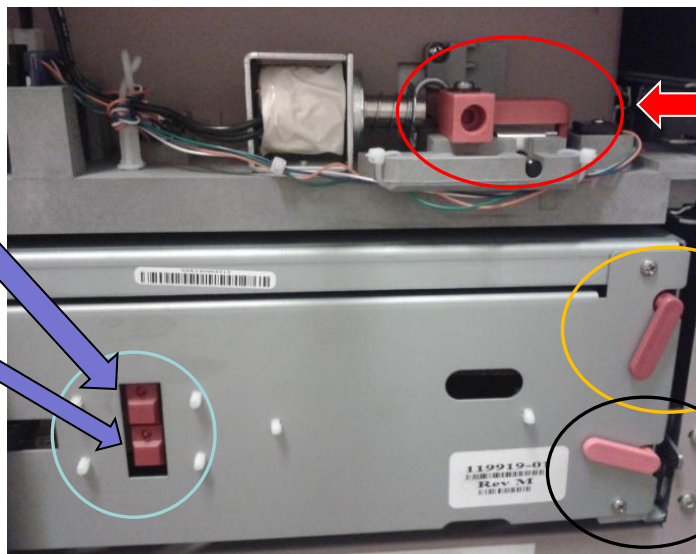

Ouverture d'un tiroir matriciel  
(poussez vers le haut le loquet rouge)

Ouverture du TIROIR du HAUT (cubies)

Ouverture du TIROIR du BAS (cubies)

### 2. RÉCUPÉRATION DES TIROIRS/PORTES/FRIGO

Consulter la procédure « [Echec matériel](#) »

- Après ouverture d'urgence du/des tiroirs et des cubies, des portes ou du frigo, il faut que l'armoire réinitialise le système:



- Revenez à l'écran principal

- Sélectionnez l'icône **Récupérer espace de stockage**

- La liste des tiroirs/portes/frigo à récupérer apparait: après sélection, l'emplacement s'ouvre et l'écran indique « Eliminer les obstructions puis fermer le tiroir ou la porte ».

- Eliminez toute obstruction puis refermez le tiroir/porte/frigo

